

BEURER OT-80 KIT DE FERTILIDAD PERSONAL

El set de fertilidad pearl by Beurer **aumenta sus posibilidades de quedarse embarazada de forma natural**, ya desde el primer mes. El set de fertilidad prueba las dos hormonas de fertilidad más importantes durante un ciclo completo. La app permite evaluar las tiras reactivas de forma sencilla y fácil.



- **Beurer Connect – Pearl Fertility.**
- **Medición independiente de las 2 hormonas de fertilidad más importantes (FSH y LH) en la orina.**
- Predicción personalizada de hasta 8 días fértiles.
- **Instrucciones paso a paso y evaluación rápida y sencilla a través de la app Pearl Fertility.**
- Representación del perfil hormonal personal.
- Pronóstico calculado para ciclos futuros.
- **Fiable incluso para ciclos irregulares*.**
- Incluye 15 tiras reactivas FSH y 15 tiras reactivas LH.
- Incluye 2 tests de embarazo.
- Incluye soporte de tiras reutilizable.
- **Se puede conservar 36 meses.**
- Compatible a partir de iOS 11.0 y Android™ 6.0.

DATOS LOGÍSTICOS:

Código de Barras: 4211125791025

Unidades de Embalaje: 12

Peso neto producto: 0,091 Kg

Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 17,60 X 47,00 X 18,50 cm

Peso bruto embalaje unitario: 0,256 Kg

Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 20,10 X 29,00 X 36,80 cm


Peso bruto embalaje: 3,592 Kg



* El kit se ha diseñado para cubrir ciclos de más de 21 días y de hasta 35 días. Los ciclos más largos pueden requerir un kit adicional.

Mide las 2 hormonas de fertilidad más importantes, LH y FSH

Pearl by Beurer mide la hormona luteinizante (LH) y la hormona foliculoestimulante (FSH) y crea a partir de los resultados un perfil hormonal personalizado. Tomando como base este perfil hormonal se determina cuándo tiene lugar la ovulación y se representa la ventana de fertilidad personal (la probabilidad diaria de concepción).

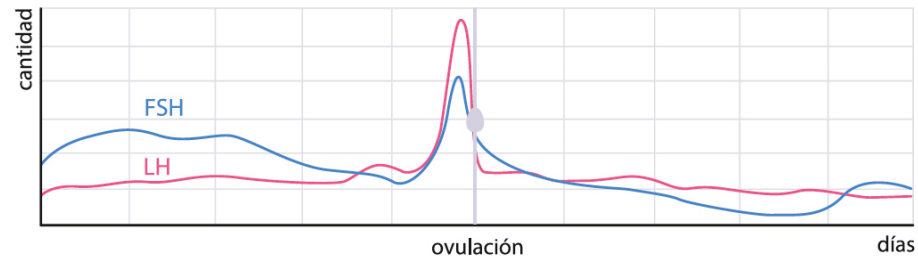

¿Cuál es el uso correcto del set?

1- Espere hasta el primer día del siguiente ciclo. Toque la flor de la app para indicar a Pearl que ha comenzado su periodo. El ciclo se establecerá en el día 1 en la app.

2- Comience la prueba cuando se despierte

La app le recuerda todos los días qué pruebas hormonales debe realizar cada vez. Con los símbolos de color podrá reconocer claramente qué tiras se deben utilizar. Haga siempre la prueba con la primera orina de la mañana.

3- Tras la reacción de las tiras reactivas, estas se transfieren a la app. Para ello se fotografían desde la app. A partir de las pruebas, se crea un perfil hormonal y se ilustra gráficamente la probabilidad de un embarazo.

